

## Wichtiger Hinweis:


Maskmaker.de und die Näher und Näherinnen der Masken übernehmen für die Schutzwirkung selbstgemachter Masken keine Haftung. Eine selbstgemachte Maske ist weder geprüft noch zertifiziert.



## Hinweise zum Tragen einer Maske:

Das Tragen einer Maske bietet keinen nachgewiesenen Schutz vor Corona.

Auch wer eine Maske trägt, sollte direkten Kontakt zu anderen Menschen vermeiden, sich regelmäßig die Hände waschen und nicht ins Gesicht fassen.

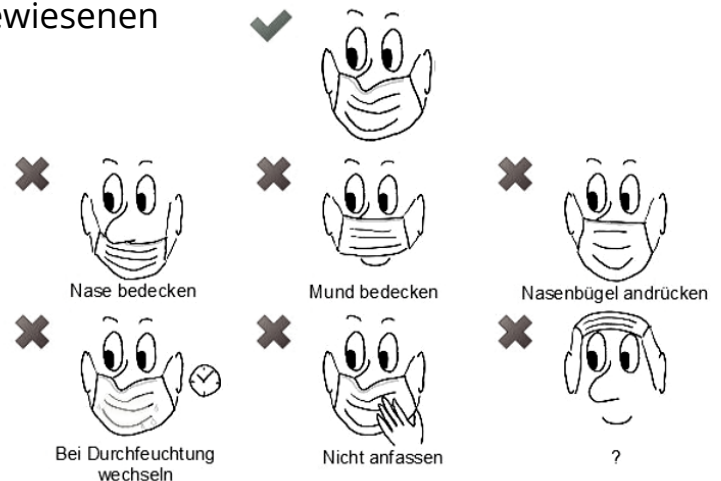

Maske aufsetzen:

1. Hände 30 Sekunden lang mit Seife waschen
2. Maske auseinander ziehen
3. Bänder beidseitig über die Ohren legen

Während des Tragens der Maske nicht ins Gesicht oder auf die Maske fassen. Sollte es dennoch passieren, anschließend die Hände waschen.

Abnehmen der Maske:

1. Hände 30 Sekunden lang mit Seife waschen
2. Die Maske nur an den Bändern anfassen und von den Ohren nehmen
3. Maske am gleichen Tag bei mind. 60 Grad waschen oder 5 Minuten auskochen
4. Hände 30 Sekunden lang mit Seife waschen
5. Die Maske vor der nächsten Nutzung trocknen lassen

Die Masken bestehen aus: \_\_\_\_\_

So kann man die Masken waschen: \_\_\_\_\_

Die Masken müssen vor der ersten Nutzung gewaschen werden.